

# X-LITE PLUS / 3D-LITE

—— 熱可塑性プラスチック ピュアシーネ ——



**X-LITE PLUS**

[JMDNコード] 36204000 (成型型副木) [届出番号] 13B3X10268000005号

| 型番          | 商品名                   | JANコード         |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 647910000   | X-LITE プラス シート 青      | 04573514492167 |
| 647920000   | X-LITE プラス シート 黒      | 04573514492174 |
| 647930000   | X-LITE プラス シート ホットピンク | 04573514492181 |
| ※ 642350000 | X-LITE プラス エッジングテープ 白 | 04573514492549 |

※ [JMDNコード] — [届出番号] 13B3X10268000001号



**3D-LITE**

[JMDNコード] 36204000 (成型型副木) [届出番号] 13B3X10268000005号

| 型番        | 商品名              | JANコード         |
|-----------|------------------|----------------|
| 648970000 | 3D-LITE シート 3 mm | 04573514492297 |
| 648990000 | 3D-LITE シート 5 mm | 04573514492310 |



**X-LITE フック**



届出番号

[届出番号] 13B3X10268000001号

| 型番        | 商品名        | JANコード         |
|-----------|------------|----------------|
| 641960000 | X-LITE フック | 04573514492211 |

# X-LITE<sup>®</sup> PLUS

# 3D-LITE<sup>™</sup>

❖ 指の骨折や小児の骨折に！

❖ 多色をご用意しております

❖ メッシュの大きさを調整することが出来ます

❖ 足首、膝、肘などをしっかり固定 3mm・5mmの2つの厚さがあります

❖ メッシュの大きさを調整することが出来ます

## 特 長

☐ 70度℃のお湯で形状付が可能

☐ ドライヤー等で形状変更が可能

軽量・高耐久

SDGs 素材

お肌に優しい




無毒で環境にも医療スタッフ様にも安心・安全



固定方法動画

## 固 定 方 法

### X-LITE PLUS

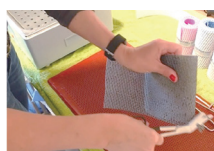

① 使用するおおよそのサイズにカット



② 67~70℃のウォーターバスに入れる



③ 柔らかくなったらウォーターバスから引き上げる



④ 水を切って、熱があるうちに必要なサイズにカット・形成していく



⑤ 患部に合うように調整していく（再形成可能）



⑥ 必要に応じてマジックテープやエッジングテープも接着し、完成

### 3D-LITE



① 使用するおおよそのサイズにカット



② 67~70℃のウォーターバスに入れる



③ 柔らかくなったらウォーターバスから引き上げ、形成



④ 装着する部位にはストッキングネットなどで覆っておく



⑤ 患部に合うように調整していく（再形成可能）



⑥ 必要に応じてマジックテープやエッジングテープも接着し、完成

【問合せ先】

グランメイト株式会社

本 社 〒260-0007 千葉県千葉市中央区祐光4丁目2番1号  
TEL 043-202-1788 FAX 043-202-1791

埼玉営業所 〒334-0068 埼玉県 川口市 新堀町 10-31  
TEL 048-280-6616 FAX 048-280-6689

